

Fiche Produit



Prothèse de hanche

*L'esprit de synthèse®*

# FOND DE COTYLE

## FOND DE COTYLE

- Armature métallique en forme de croix asymétrique.
- Palette supérieure détournée pour vis à corticale diamètre 4,5 mm.
- Branches latérales de longueur réduite pour éviter leur débordement au delà des parois osseuses.
- Crochet inférieur orienté dans la direction du bord supérieur du trou obturateur pour une meilleure application.

La gamme comprend 5 fonds de cotyle en acier inoxydable, droits et gauches, désignés par leur diamètre extérieur et leur diamètre intérieur : un fond de cotyle 55/51 est prévu pour être associé à 2 diamètres successifs

### Un renfort anatomique

de cupule cimentée 48 mm et 50 mm (ou 46 mm et 48 mm si une épaisseur plus importante de ciment est désirée).

Le côté est défini simultanément par :

- l'asymétrie de longueur **des branches latérales** (la branche postérieure est au plan équatorial, la branche antérieure est en-déçà du plan équatorial de 10 mm).
- l'inclinaison **du crochet inférieur** de 10° vers l'avant.



La palette supérieure détournée en forme de trèfle pour limiter sa rigidité comporte 4 trous pour vis à corticale diamètre 4,5 mm type Maconor.

Les vis ne sont pas fournies.

Des "spacers" en PMMA pouvant coulisser le long de chacune des 4 branches contribuent à uniformiser l'épaisseur de la couche de ciment entre le fond de cotyle et la cupule associée.

Le petit orifice au centre de la croix permet d'apprécier le contact entre l'armature et le fond de la cavité osseuse et de prendre appui avec une pointe carrée pendant l'opération de vissage.

### Fond de cotyle gauche ou droit

ø extérieur ø intérieur	51/47	55/51	59/55	63/59	67/63
gauche	12510814	12550814	12590814	12630814	12670814
droit	12510834	12550834	12590834	12630834	12670834

Le fond de cotyle peut être associé dans la gamme ASTON :

- au cotyle polyéthylène cimenté **STERWEN®**
- au cotyle métallique cimenté à double mobilité **MEDIAL CUP®**

Référence Ancillaire : A35361

# FOND DE COTYLE

Aston Médical - Saint Etienne - France - Tél 33 (0)4 77 93 00 04 - Fax 33 (0)4 77 74 35 93

Fabricant : SGM - Z.I. Montreynaud - 19, rue Victor Grignard 42026 Saint Etienne Cedex 1 - France