

Fiche Produit



Prothèse de hanche

L'esprit de synthèse[®]

BHS Varia[®]

Tige fémorale sans ciment de reprise

Indications

Arthroplastie de hanche sans ciment de reprise.

Principes

- Tige droite de forme autobloquante, de longueur croissante avec la taille, de 30 à 40mm supérieure à celle d'une tige classique de 1ère intention.
- **Col modulaire permettant de régler angle cervico-diaphysaire, antéversion et longueur du membre opéré.**
- Modèles verrouillables proposés ultérieurement.

Caractéristiques

- La gamme de tiges comprend 5 tailles de longueur croissante de **180mm à 220mm**.
- La métaphyse est identique à celle de la tige fémorale BHS de 1ère intention. Une collerette interne de bonne dimension assure la compression des greffes ou du volet osseux en regard.
- La diaphyse est conique avec une double fente à son extrémité afin de faciliter le passage de la courbure postérieure et réduire la rigidité de la prothèse.
- La tige est revêtue d'un bicouche rugueux titane pur/hydroxyapatite sur son tiers proximal et d'un monocouche d'HAC sur ses deux tiers distaux.
- Les 2 cols, neutre 0° et béquillé 10° à 8 positions, chacun décliné en 2 longueurs, standard et + 10 mm, permettent un réglage précis de l'antéversion et de l'angle cervico-diaphysaire en respect de la longueur de membre. Le col neutre 0° de longueur standard restitue le col monobloc de la BHS de 1ère intention avec un angle cervico-diaphysaire de 132° et une longueur de 41mm.
- **Le cône 6°/10-12** combine les avantages d'un débattement angulaire du col important avant effet came et d'une association possible avec un large éventail de têtes en métal et en céramique.

Matériaux

- Tige et col modulaire en alliage de titane TA6V (ISO 5832-3).
- Revêtement de titane pur et d'hydroxyapatite ou d'hydroxyapatite seule (selon spécifications fabricant en respect des normes en vigueur).

Références des implants

Tiges : la numérotation des tailles fait référence à celle de la gamme BHS de 1ère intention (jeu de râpes commun)

Taille	4	6	7	8	9
Référence	18043920	18063920	18073920	18083920	18093920

Cols modulaires - Cône 6°/10-12

Modèle		
Neutre 0°	Longueur standard	22000089
	Longueur + 10 mm	22001089
Béquillé 10°	Longueur standard	22100089
	Longueur + 10 mm	22101089

Référence ancillaire : réf. A36626

BHS Varia®

Aston Médical – Saint Etienne – France – Tél 33 (0)4 77 93 00 04 – Fax 33 (0)4 77 74 35 93
Z.I. Montreynaud – 19, rue V. Grignard 42026 Saint-Etienne Cedex 1 – France



Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, le fabricant se réservant le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité du produit. Les conditions d'utilisation de l'implant sont formulées dans la notice d'instructions.

