

Fiche Produit

Prothèse de Hanche

L'esprit de synthèse®



CUPULE MOBILE

à Chanfrein

CUPULE MOBILE à Chanfrein

Indications

Fracture du col fémoral.

Principes

- Cupule mobile à forte rétentivité pour tête de 28 mm.
- Réduction de la tête dans la cupule par presse fournie.

Caractéristiques

La cupule est constituée d'une coque en acier inoxydable sertie d'une couche de polyéthylène intérieure.

La rétentivité de la tête dans la cupule est assurée par le diamètre d'entrée de la cupule inférieur à celui de la tête prothétique, de diamètre obligatoire 28 mm.

La gamme est déclinée en diamètres pairs.

L'ancillaire est réduit à une presse de réduction de la tête dans la cupule, utilisée sur table.

Sur demande, une plaque de calibrage de la tête osseuse et des cupules d'essai sont disponibles.

Matériaux

- Cupule en acier inoxydable ISO 5832-1 et polyéthylène UHMWPE ISO 5834-1 et 5834-2

Références des implants

Cupules à chanfrein "forte rétentivité"

Ø extérieur	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Référence	33505	33507	33509	33511	33513	33515	33517	33519	33521

Référence ancillaire : • Presse de réduction réf. A33384 • Sur demande, plaque de calibrage de la tête osseuse et cupules d'essai réf. A35026

CUPULE MOBILE à Chanfrein



Aston Medical - Saint Etienne - France - Tél 33 (0)4 77 93 00 04 - Fax 33 (0)4 77 74 35 93
Z.I. Montreynaud - 19, rue Victor Grignard 42026 Saint Etienne Cedex 1 - France

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, le fabricant se réservant le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité du produit.
Les conditions d'utilisation de l'implant sont formulées dans la notice d'instructions.



Fiche Produit

Prothèse de Hanche

L'esprit de synthèse®



CUPULE MOBILE

à Bague

CUPULE MOBILE à Bague

Indications

Fracture du col fémoral.

Principes

- Cupule mobile rétentive pour tête de 28 mm.
- Bague de rétention amovible pour essais de réduction dans cupule définitive.
- Ancillaire réduit à une simple pince pour l'extraction de la bague de rétention.

Caractéristiques

La **cupule** est constituée d'une coque en acier inoxydable sertie d'une couche de polyéthylène intérieure. Elle est déclinée en diamètres pairs.

Pour garantir une épaisseur suffisante de la couche de polyéthylène, réduite par la présence de la bague amovible, le diamètre minimum disponible de cupule est de 44 mm.

La **bague** assure la rétentivité de la cupule. Elle est clippée dans la cupule par le fait de son élasticité. Elle est livrée prémontée à la périphérie de la cupule.

Si elle ne doit pas être ôtée pour les essais de réduction, la poussée de la tête prothétique définitive dans la cupule suffit à son clippage. Si elle est extraite pour des essais de réduction (la laisser alors flottante autour du col de la tige), elle est remise en place au bord de la cupule par l'opérateur avant clippage.

Si le sens d'introduction de la bague a été perdu, **il est facile de le retrouver par les 2 trous borgnes de la bague, servant à son déclippage, qui doivent se situer à l'opposé de la cupule, côté tête.**

Il est conseillé après la réduction définitive de vérifier le bon clippage de la bague en effectuant un test de traction de l'articulation.

En cas de clippage précoce intempestif ou de nécessité d'extraire la bague pour libérer ultérieurement la tête prothétique, l'extraction s'effectue par simple serrage de la bague, réalisé à l'aide de la pince type Baby Hartmann (ou autre pince hémostatique sans griffe) livrée avec les cupules, dont les mors sont passés dans les 2 trous borgnes de la bague.

Matériaux

- Cupule en acier inoxydable ISO 5832-1 et polyéthylène UHMWPE ISO 5834-1 et 5834-2
- Bague de rétention en polyéthylène UHMWPE ISO 5834-1 et 5834-2

Références des implants

Cupules à bague en diamètres pairs

Ø extérieur	44	46	48	50	52	54	56
Référence	32260	32262	32264	32266	32268	32270	32272

La gamme de cupules à bague, dans les petites tailles, peut être complétée par une autre version de cupule mobile appelée cupule à chanfrein.

Elle est disponible, pour tête 28 mm, en diamètre 40 mm (réf. 33505) et 42 mm (réf. 33507).

La réduction de la tête dans la cupule à chanfrein s'effectue sur table à l'aide d'une presse fournie réf. A33384.

Référence ancillaire : pince pour extraction de bague réf. A36025

CUPULE MOBILE à Bague



Aston Medical - Saint Etienne - France - Tél 33 (0)4 77 93 00 04 - Fax 33 (0)4 77 74 35 93
Z.I. Montreynaud - 19, rue Victor Grignard 42026 Saint Etienne Cedex 1 - France

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, le fabricant se réservant le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité du produit.
Les conditions d'utilisation de l'implant sont formulées dans la notice d'instructions.

